

Gebruikershandleiding

B&S Autofixatiesysteem



- Auto-aanpassing
- Revalidatietechniek
- Mobiliteits- en hulpmiddelen

Onbeperkt in beweging.nl

Onderdelen B&S Autofixatiesysteem

Basisband



H-fixatie

(nodig bij montage om complete 'vaste' stoel)



7-puns fixatievest



Extra band tegen zweven

(nodig bij montage om complete 'vaste' stoel)



Set extra verbindingsbandjes



Veiligheidshamer met gordelsnijder

(uitvoering kan verschillen i.v.m. wisselend aanbod)



Veiligheidssluiting met penslot



Afsluitbare steekgesp



Wetgeving en veiligheid

Voor de meest actuele wetgeving omtrent kinderzitjes verzoeken wij u de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat te bezoeken, www.autostoeltjes.veiligheid.nl. Woont u in België? Bezoek dan de website van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw, www.bivv.be.



Bij gebruik van het B&S Autofixatiesysteem blijft gebruik van de standaard 3-punts veiligheidsgordel verplicht!



Het gebruik van het B&S Autofixatiesysteem is te allen tijde op eigen risico.



Draai de afsluitbare steekgespen alleen extra op slot als dit echt nodig is!



Wij adviseren (zeker bij gebruik door derden) om met alle betrokkenen af te stemmen dat een persoon vervoerd wordt met een B&S Autofixatiesysteem.



Zorg dat de meegeleverde gordelsnijder binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is!

Afsluitbare steekgespen



Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met afsluitbare steekgespen? Draai deze alleen op slot indien het echt noodzakelijk is! Probeer na verloop van tijd eens uit of u wellicht alle of een aantal van de zeven steekgespen niet meer op slot hoeft te draaien.

Veiligheidssluitingen met pensloten



Is uw autofixatiesysteem uitgevoerd met veiligheidssluitingen met pensloten? Zorg ervoor dat de meegeleverde pen binnen handbereik van de chauffeur en/of begeleider is!

CE-markering



Wij verklaren hierbij dat het B&S Autofixatiesysteem voldoet aan de gelijkwaardige regels van het medisch product en de richtlijn 93/42EEG.

Onderhoud



Onze fixaties kunnen afgenomen worden met een licht vochtige doek. Gebruik voor reiniging geen agressieve schoonmaakmiddelen en was ze niet in de wasmachine!


Gebruik in combinatie met zitverhoger

Het B&S Autofixatiesysteem kan gebruikt worden in combinatie met een zitverhoger. Dit dient een zitverhoger *zonder* rugleuning te zijn. Het is uiteraard belangrijk dat u het fixatievest op de juiste hoogte in stelt. Een extra aandachtspunt is het 7e punt, de band die tussen de benen door gaat. Deze moet achter de zitverhoger langs te gaan!



Optionele afdekkapje veiligheidsgordel

Als een kind/volwassene in de auto zelfstandig de sluiting van verplichte 3-puntsgordel opent ontstaat er een gevaarlijke situatie. Voorkom dit met het afdekkapje voor het gordelinsteekpunt. Uiteraard verkrijgbaar in onze webshop.

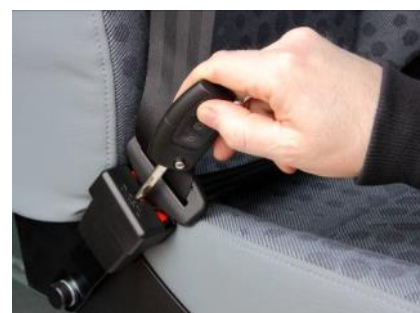

Aandachtspunten juiste instelling

Zorg ervoor dat het fixatievest juist ingesteld is. Zorg ervoor dat de verbindingsbandjes tussen het vest en de basisband op de juiste lengte afgesteld zijn, niet te los en zeker ook niet te strak. Het fixatievest moet comfortabel zitten voor degene die erin plaats neemt.

Bevestig te allen tijde de verplichte 3-punts veiligheids-gordel welke in de auto/taxibus aanwezig is!


Schouderbanden door de juiste doorvoer halen.



Zorg ervoor dat het fixatievest niet te hoog gemonteerd is.

Montagepunten ter hoogte van de oksel, bevinden zich bij de oksel.

Montagepunten ter hoogte van de heup, bevinden zich bij de heup.

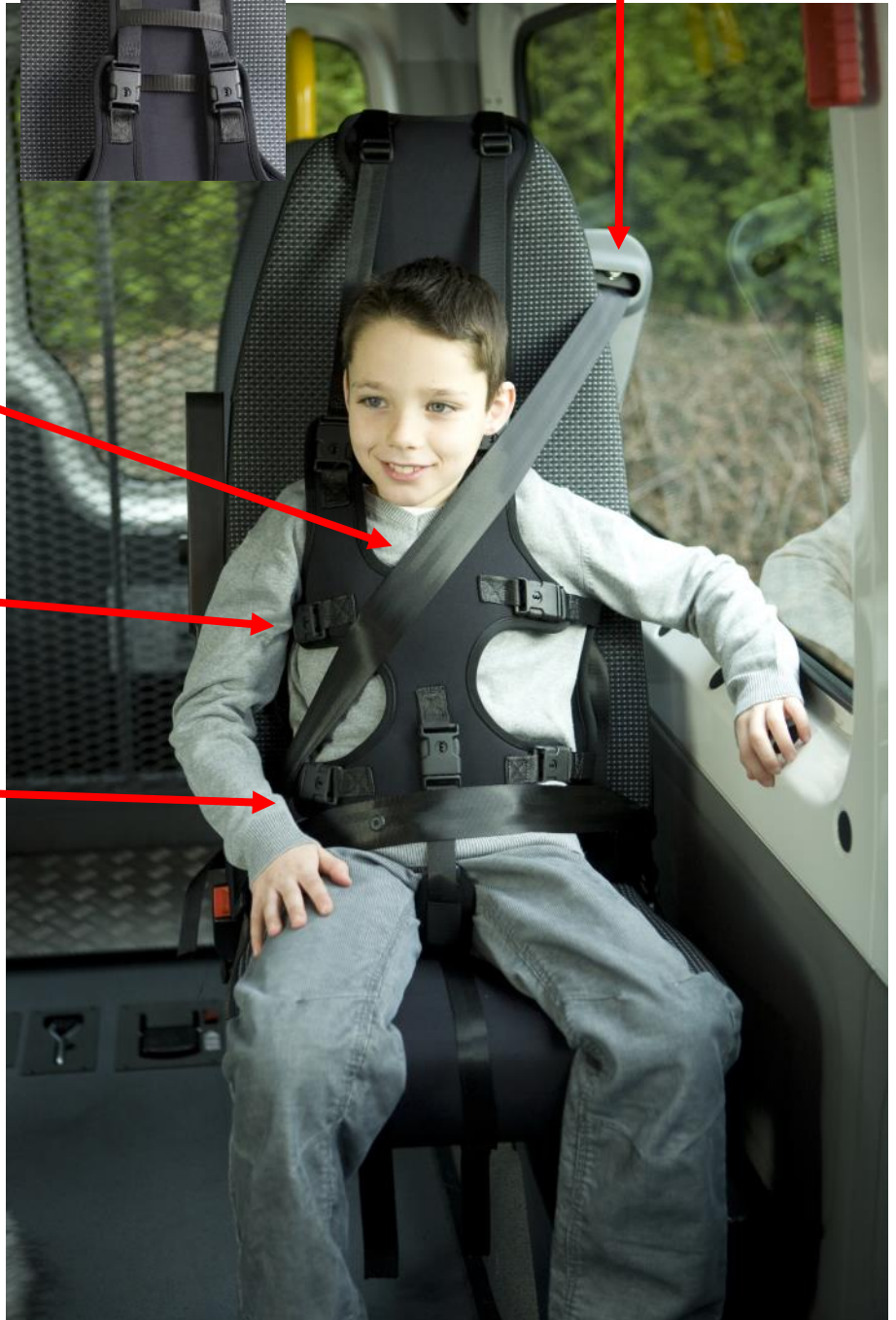

Montage 'alleen' om rugleuning

Leg de basisband om de rugleuning van de autostoel -/bank (1). Klap de autostoel-/bank indien nodig even voorover. De basisband gaat aan de onderzijde tussen de rugleuning en de zitting (3) en aan de bovenzijde tussen de pinnen van de hoofdsteun door. Voor gebruik van het fixatiesysteem bij langere kinderen wordt de basisband over de hoofdsteun gemonteerd.

Trek aan de achterzijde de twee bevestigingsbanden (A) aan. De twee veiligheidssluitingen zitten hierbij dus aan de achterzijde van de rugleuning (2).

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen. Stel de gewenste lengte van de verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven (4).



Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto!



Montage om complete 'vaste' stoel

Leg de basisband om de rugleuning en de bevestigingsbanden over de zitting van de autostoel-/bank (5).

De meegeleverde H-fixatie klikt u aan de bevestigingsbanden welke over de zitting gaan (5/A). De connectieband (8/B) valt tussen de stoelpoten. De bevestigingsbanden gaan langs de achterzijde van de rugleuning omhoog naar het ontvangstdeel van de veiligheidsgordel (6/C). Indien mogelijk bevestigd u de basisband aan de bovenzijde tussen de pinnen van de hoofdsteun.

De meegeleverde 'extra band tegen zweven' (6/7/D) brengt u om de stoel in de zithoek heen. Dit voorkomt het 'zweven' van de basisband boven de zitting.

NB. Het 7de punt valt ook achter deze 'extra band tegen zweven' (7/E). Vervolgens gaat deze over de zitting naar de klepsluiting aan de achterzijde van de rugleuning (6/F).

Monteer het fixatievestje aan de basisband met de zeven steekgesp-/veiligheidssluitingen. Stel de gewenste lengte van de verbindingsbandjes in op de maten van de inzittende. Indien deze op de juiste maat afgesteld staan, zorg ervoor dat u de bandjes borgt zodat ze niet verschuiven (9).



Breng tenslotte altijd de verplichte standaard 3-punts veiligheidsgordel aan voor het veilig en wettelijk toegestaan vervoer van personen in de auto!



Meer dan 40 jaar onbeperkt in beweging...

B&S zet zich al ruim 40 jaar in voor het bieden van zelfstandigheid aan mensen met een lichamelijke beperking. Groot geworden door een enorme expertise in autoaanpassingen en revalidatietechniek, maar nog altijd met een zeer persoonlijke benadering. Omdat niet alleen elk mens verschillend is maar ook elke beperking. B&S denkt graag mee met de klant en zoekt altijd naar de juiste individuele oplossing.

B&S is importeur en leverancier van de beste producten in hun soort maar is vooral ook sterk in het ontwikkelen en produceren van eigen producten die mobiliteit en zitcomfort kunnen verhogen. Met onze uitgebreide kennis en technische mogelijkheden op het gebied van aanpassingen aan auto of hulpmiddelen, gekoppeld aan het leveren van een uitgebreid assortiment revalidatie- en hulpmiddelen, biedt B&S haar klanten het gemak van 'alles op één adres'. Van wandbeugel of buggy tot complete autoaanpassing, B&S: onbeperkt in beweging!



• Auto-aanpassing • Revalidatietechniek
• Mobiliteits- en hulpmiddelen

Onbeperkt in beweging.nl

Kathodeweg 5
1627 LK HOORN
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl

Xenonweg 7A
3812 SZ AMERSFOORT
Telefoon +31 (0)85 0717 600
info@onbeperktinbeweging.nl
www.onbeperktinbeweging.nl